




Notice de montage Visière Protection ELVI10

Le détail des ingrédients et des fichiers ressources :
<https://code.electrolab.fr/covid-19/visiere>

Pièce 1: Bandeau feuille


Pièce 2: Bandeau tête

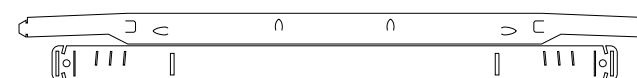

1

Assemblage bandeau feuille avec transparent

Nota: le transparent doit d'abord avoir été perforé avec une perforatrice 4 trous standard (8cm d'espacement) pour format A4 sur le coté le plus long.

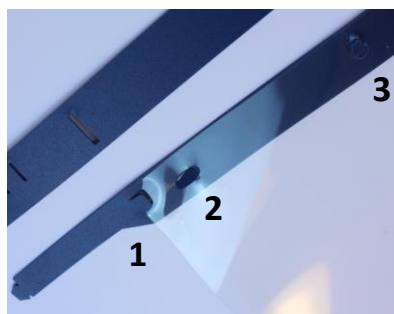

1. Insérez les ergots (2) puis (3), (4) et (5) dans les trous de la feuille transparente.


2. Glissez ensuite les extrémités de la feuille transparente sous les ergots (1) et (6).




2

Assemblage élastique sur bandeau tête

Nota: L'élastique fait 25cm de long et maximum 1.8cm de large.

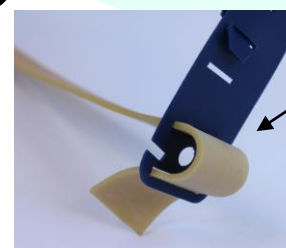


1. Insérez un bout de l'élastique dans l'encoche (2) puis dans (1)
2. Faites de même de l'autre coté

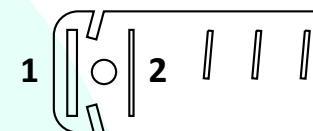



Astuce 1: Vous n'avez pas d'élastique type garot? Le design permet d'autres solutions.

- Bande élastique de couture: Passage dans le trou (3) puis nœud.
- Élastique classique: Passage dans le trou (3) puis rabattage dans les encoches (5) et (6)

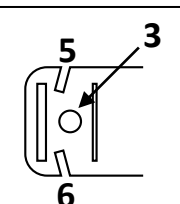

3

Assemblage des 2 pièces créées

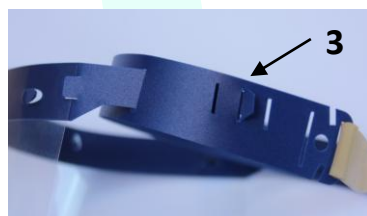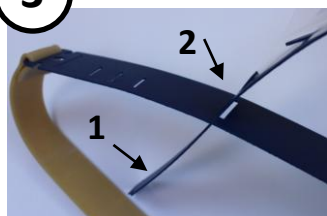


1. Insérez la languette (1) dans l'encoche (2) puis le bout de languette (1) dans l'encoche (3)
2. Faites de même à l'opposé

Astuce 2: Vous pouvez régler la profondeur de la visière en utilisant les 2 autres encoches (3) disponibles



4

Votre visière de protection est prête à l'emploi

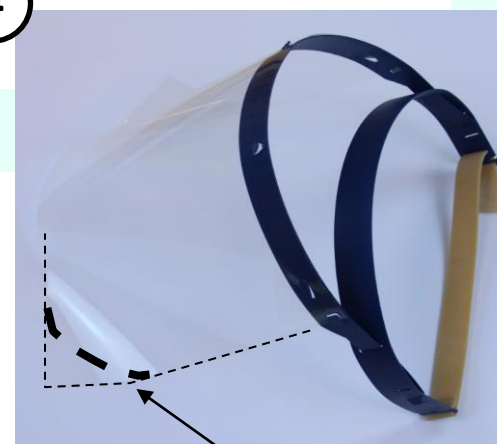

Astuce 3: Vous pouvez régler le serrage autour de votre tête en tirant sur l'élastique



Fichiers du projet

Astuce 4: Vous pouvez découper les angles de la feuille transparente en arrondi